


SafeMask Architect Pro™


POSE DE MASQUE

Avant de mettre un respirateur, il faut toujours effectuer un test d'ajustement et se laver/désinfecter les mains.

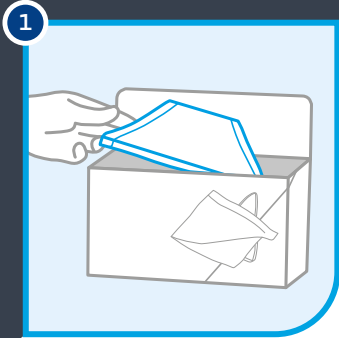


1 RETIRER LE MASQUE DE L'EMBALLAGE

Retirer un masque de la boîte extérieure.

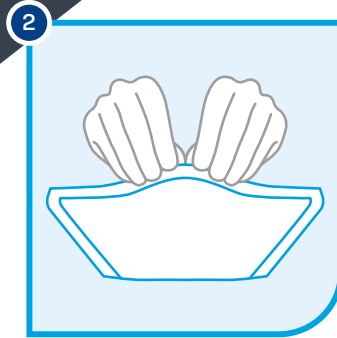


2 FORMER LA BARRETTE NASALE

Préparer le masque en formant la barrette nasale.

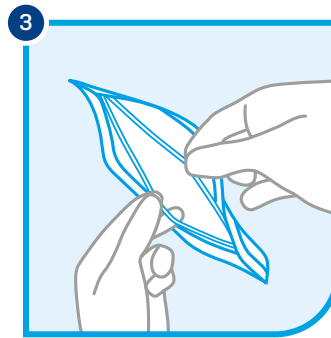


3 SÉPARER LES BANDES DE CONFORT

Tenir le centre des bandes et les séparer en tirant dessus.

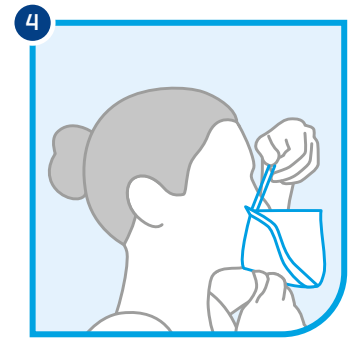


4 METTRE LE MASQUE

Placer le bas du masque sous votre menton.

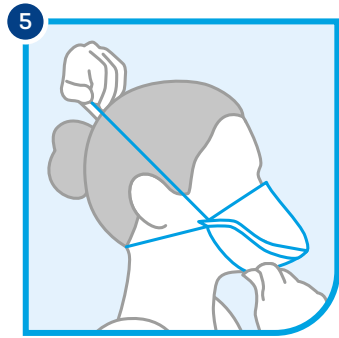


5 METTRE LES BANDES DE CONFORT

Tenir le masque sous votre menton d'une main. De l'autre main, faire passer les bandes de confort au-dessus de votre tête.

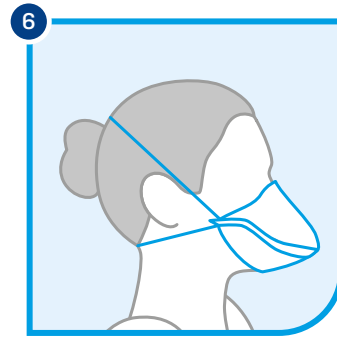


6 POSITIONNER LES BANDES DE CONFORT

Placer la bande supérieure autour de la couronne de votre tête et positionner la deuxième bande de manière qu'elle s'adapte bien et confortablement.

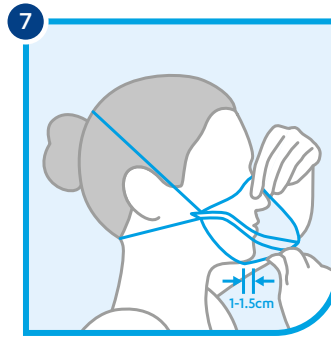


7 POSITIONNER LE MASQUE CORRECTEMENT

S'assurer que le masque est confortablement installé sous le menton, à environ 1 à 1,5 cm derrière la mâchoire et sur l'arête du nez.

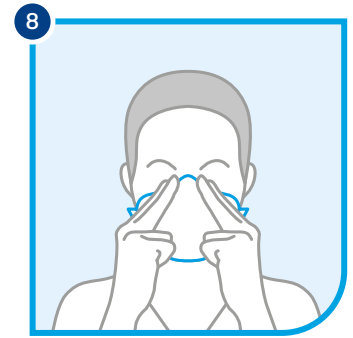

8 SCELLER LE MASQUE

En utilisant deux doigts de chaque côté du nez, presser fermement autour de votre nez et sur vos joues, en vous concentrant sur l'arête du nez, pour assurer l'étanchéité.

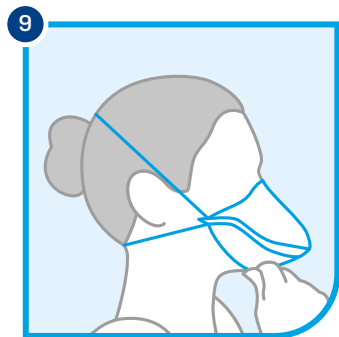

9 VÉRIFIER L'AJUSTEMENT

Aucun air ne doit s'échapper du bord du masque. En cas de doute, répéter l'étape 8, en appuyant fermement.




10 L'AUTO-TEST

S'ASSURER QUE LE MASQUE ADHÈRE BIEN À VOTRE VISAGE


- Couvrir le devant du masque avec vos mains pour bloquer la circulation de l'air.
- Inhaler profondément.
- Si de l'air circule autour de votre nez, répéter l'étape 8.
- Si de l'air circule autour du masque, ajuster soigneusement les bandes et répéter l'étape 8.
- Si l'ajustement n'est pas satisfaisant, ne pas entrer dans une zone où un masque est nécessaire.

SafeMask Architect Pro™ RETRAIT DE MASQUE


Il est important de ne pas toucher le tissu du masque lors de son élimination.

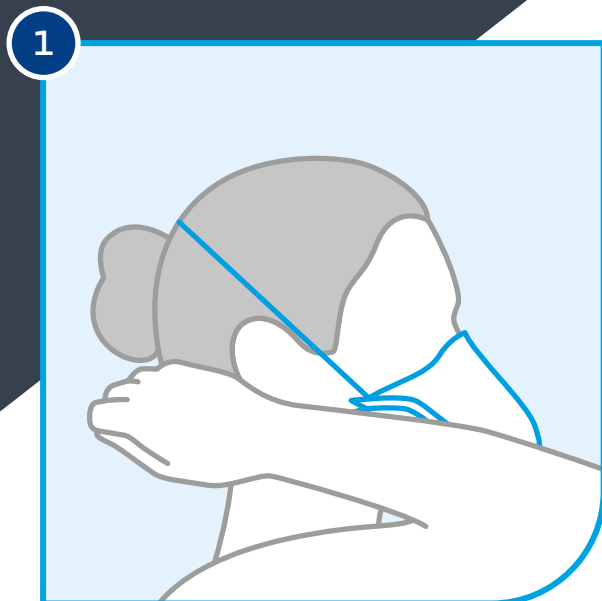

Tenir les bandes à l'arrière de votre tête.

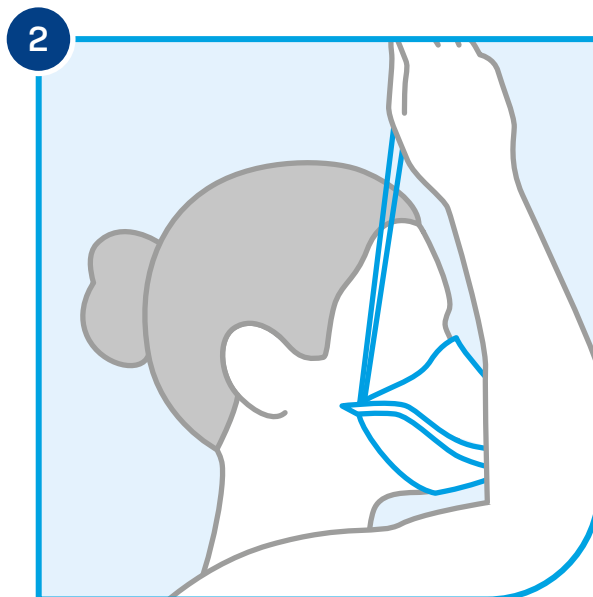

Tirer les bandes sur votre tête et retirer le masque en l'éloignant de votre visage, en prenant soin de ne pas toucher sa surface extérieure.

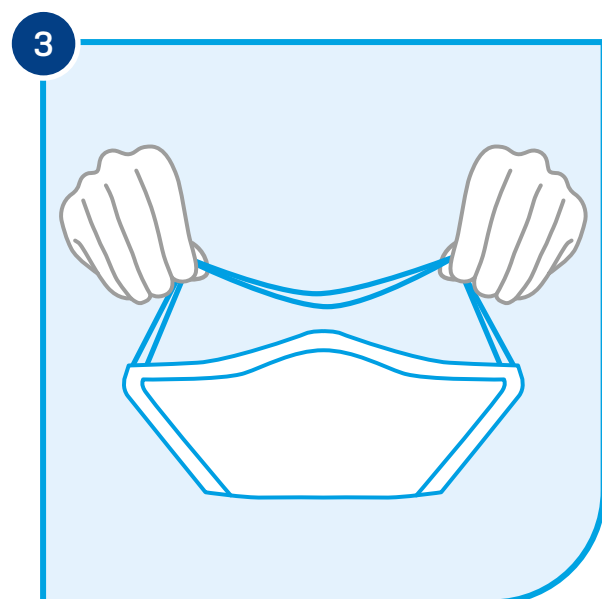

En tenant toujours les bandes, jeter le masque dans la poubelle clinique prévue à cet effet. Ne pas toucher le tissu du masque.



Vous laver toujours soigneusement les mains après avoir retiré un masque.